

> MASCARILLAS QUIRÚRGICAS ADULTOS 3 CAPAS TIPO IIR



CAPACIDAD DE FILTRADO BFE≥99,5%

Cumple con la norma: UNE-EN 14683:2019

Cuenta con ensayo realizado por AITEX.

APR100

Mascarillas quirúrgicas adultos
3 capas Tipo IIR



TALLA ÚNICA



DESECHABLE



USO ÚNICO



SIN LÁTEX



Indicaciones

- Reducir el riesgo de propagación de infecciones, particularmente en situaciones epidémicas o pandémicas, para pacientes y otras personas que las lleven puestas (en el sentido de la exhalación). No proporciona un nivel fiable de protección frente a la inhalación de partículas. Reducción de la emisión de agentes infecciosos hacia afuera, desde la nariz y la boca de un portador asintomático o de un paciente con síntomas clínicos, gracias a la barrera microbiana.

Advertencias

- Estas mascarillas son de un solo uso, y no son reutilizables. La colocación, el uso y la retirada de las mascarillas para niños se deben supervisar por un adulto. Deseche la mascarilla después de su uso y reemplace en caso de llevarla durante un periodo largo de tiempo o al cambiar de actividad. Para el desecho de la mascarilla y de su envase, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad y en caso de contaminación biológica con residuos biológicos como sangre, fluidos biológicos, etc., deposite la mascarilla en un contenedor apropiado. Desinfectese las manos después de haberla desechado.

Instrucciones de uso

- Los puntos de inserción de las tiras elásticas quedan hacia el interior, de modo que se identifica fácilmente la cara interna (la parte que está en contacto con la cara) de la cara externa de la mascarilla. En la parte superior lleva una banda nasal moldeable, que mejora la adaptabilidad alrededor del contorno del puente nasal del usuario.



Coloca la cintadetrás
de las orejas



Cubre la boca y la
nariz adecuadamente



Presiona la tira metálica
para ajustar a la nariz